



CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA

I. Modelos

CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 12,5mm x 10m ou 12,5mm x 5m ou 12,5mm x 4,5 ou 12,5mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 25mm x 10m ou 25mm x 5m ou 25mm x 4,5 ou 25mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 50mm x 10m ou 50mm x 5m ou 50mm x 4,5 ou 50mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA 100mm x 10m ou 100mm x 5m ou 100mm x 4,5 ou 100mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BEGE 12,5mm x 10m ou 12,5mm x 5m ou 12,5mm x 4,5 ou 12,5mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BEGE 25mm x 10m ou 25mm x 5m ou 25mm x 4,5 ou 25mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BEGE 50mm x 10m ou 50mm x 5m ou 50mm x 4,5 ou 50mm x 9,1m;
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BEGE 100mm x 10m ou 100mm x 5m ou 100mm x 4,5 ou 100mm x 9,1m.

II. Apresentação Comercial

Caixa contendo 1, 12, 24, 48, 72, 100, 150 e 200 unidades

III. Finalidade

Cepalab Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica é indicada para ferimentos superficiais com características hipoalergênicas, especialmente indicado para uso em zonas e pessoas sensíveis. Produto de uso externo.

IV. Princípio de Funcionamento

Mecânico.

V. Modo de Uso

1. Limpe a lesão conforme os procedimentos normais.
2. Selecione o material curativo adequado.
3. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade.
4. Selecione o tamanho apropriado da fita, desenrole a quantidade necessária e corte-a com uma tesoura.
5. Aplique o material curativo sobre a lesão.
6. Fixe todo o curativo pressionando a fita levemente do centro para as bordas.

VI. Produto Estéril

Não.

VII. Método de esterilização

Não se aplica.

VIII. Prazo de validade

2 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

Este produto poderá ser manuseado por adultos e profissionais da área de saúde, tais como: farmacêuticos, enfermeiros e médicos.

XIV. Advertências

Caso ocorra irritação na pele por uso deste produto, suspenda o uso.

Produto de uso único. Destruir após o uso. Atóxico.



Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada ou violada.

XV. Precauções

Não use tintura de benjoim, álcool, éter, benzina e outros solventes para remoção, caso necessário use vaselina. Suspenda o uso em caso de irritação.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e portanto para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

Wuxi Beyon Medical Products Co., Ltd
No.5 - E2, Fang Guan Industrial Park, Jiaye Road, Wuxi, Jiangsu, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258020013

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: cepalab@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772