
	Instrução de uso do produto Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 1/29	
	Versão: 01		


Ilustração do produto

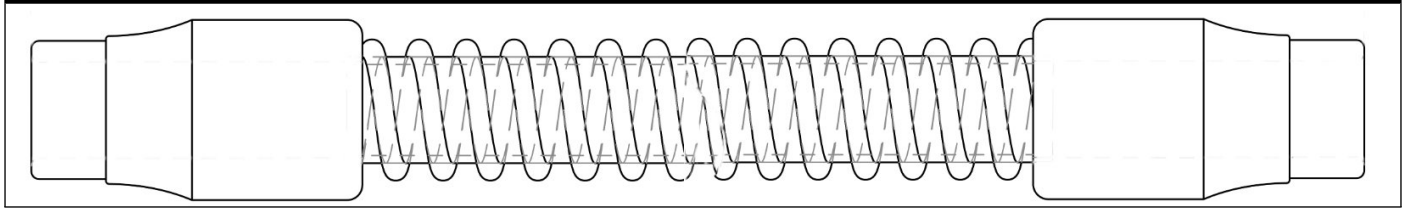


Descrição e indicações do produto

O produto funciona transportando um fluxo de gases oriundos de um local ao outro por meio de um tubo corrugado externamente montado com dois encaixes em sua ponta. Este produto pode ser usado para realizar conexões entre equipamentos, acessórios, sistemas, circuitos, conectores, interfaces e adjacentes conforme a necessidade do profissional de saúde responsável pela administração do tratamento/procedimento.



Informações do Fabricante e Detentor do registro

	Detentor do Registro	Ventcare Indústria e Comércio LTDA
	CNPJ do Detentor do Registro	11.011.753/0001-19
	AFE do Detentor do Registro	8.06770-4 (U30X0XMY7WL3)

Especificações regulatórias

	Nome técnico	Tubo Traqueal
	Nome comercial	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA
	Registro na ANVISA	80677049013
	Classificação de risco	II – Médio risco

Vida útil e esterilidade

	Validade do produto	5 Anos a partir da data de fabricação
	Esterilidade	Produto comercializado não-estéril
	Compatibilidade de esterilização	Baixa temperatura: Gás Óxido de Etileno (ETO).
		Alta Temperatura: Produto INCOMPATÍVEL com esterilização sob alta temperatura, submeter este produto a temperaturas superiores a 70°C poderá causar danos irreversíveis a sua estrutura.



Instrução de uso do produto

Código:
MI01Data:
25/11/2025

Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA

Página:
2/29

Versão: 01

Instrução de uso



Para realizar a devida montagem do produto certifique-se que você se encontra com as mãos, superfície de trabalho e equipamento devidamente higienizados conforme regimento interno e siga as instruções abaixo:

1. Acople ambas as pontas da traqueia no local aonde deseja realizar o transporte de gases, em seguida dê início ao procedimento.

**Alerta, aviso ou precaução importante:**

Atenção, as informações supracitadas são uma disposição de instruções de uso, todavia, tenha como prioridade os protocolos institucionais de boas práticas e/ou consulte seu superior imediato.

Recomendações para esterilização e reprocessamento

**Diretrizes importantes:**

- Gás Óxido de Etileno (ETO):
 - Por motivos de segurança recomenda-se um ciclo de no mínimo 24 horas para aeração após cada ciclo de esterilização por meio de exposição a Gás Óxido de Etileno (ETO).

**Aviso importante:**

Atenção, as informações supracitadas são uma disposição de recomendações de esterilização e devem ser usadas como referência básica, tenha como prioridade seus procedimentos de validação de equipamento de esterilização ou documento equivalente e consulte seu responsável técnico.

Informações e cuidados para armazenamento e transporte



- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformações, danos, ou exposição à elementos externos



- Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.

- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.



Instrução de uso do produto

Código:
MI01Data:
25/11/2025

Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA

Página:
3/29

Versão: 01

Instruções de descarte

Aviso Importante:


Este artigo refere-se a um artefato destinado ao emprego em contextos médico-hospitalares e/ou em circunstâncias relacionadas à prestação de cuidados médicos domiciliares. A disposição final deste produto deve ser realizada em local apropriado separadamente do lixo comum e em estrita conformidade com as normas jurídicas em vigor na respectiva jurisdição e/ou de acordo com os protocolos institucionais aplicáveis. Em caso de incerteza, recomenda-se a consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou às autoridades competentes na região em questão.

Referências:


- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 222/18
- Lei Nº 12.305, De 2 De Agosto De 2010
- Resolução CONAMA nº 358/2005

Tabela de modelos (Coloração Translúcida)


VENT-TP0100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X100) ADULTO
VENT-TP0100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X100) ADULTO
VENT-TP0100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X100) INFANTIL
VENT-TP0100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X100) ADULTO
VENT-TP0100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X100) INFANTIL
VENT-TP0100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X100) NEONATAL
VENT-TP0150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X150) ADULTO
VENT-TP0150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X150) ADULTO
VENT-TP0150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X150) INFANTIL
VENT-TP0150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X150) ADULTO
VENT-TP0150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X150) INFANTIL
VENT-TP0150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X150) NEONATAL
VENT-TP0200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X200) ADULTO
VENT-TP0200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X200) ADULTO
VENT-TP0200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X200) INFANTIL
VENT-TP0200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X200) ADULTO
VENT-TP0200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X200) INFANTIL
VENT-TP0200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X200) NEONATAL

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 4/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP0250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X250) ADULTO
VENT-TP0250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X250) ADULTO
VENT-TP0250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X250) INFANTIL
VENT-TP0250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X250) ADULTO
VENT-TP0250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X250) INFANTIL
VENT-TP0250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X250) NEONATAL
VENT-TP0300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X300) ADULTO
VENT-TP0300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X300) ADULTO
VENT-TP0300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X300) INFANTIL
VENT-TP0300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X300) ADULTO
VENT-TP0300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X300) INFANTIL
VENT-TP0300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X300) NEONATAL
VENT-TP0350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X350) ADULTO
VENT-TP0350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X350) ADULTO
VENT-TP0350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X350) INFANTIL
VENT-TP0350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X350) ADULTO
VENT-TP0350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X350) INFANTIL
VENT-TP0350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X350) NEONATAL
VENT-TP0400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X400) ADULTO
VENT-TP0400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X400) ADULTO
VENT-TP0400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X400) INFANTIL
VENT-TP0400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X400) ADULTO
VENT-TP0400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X400) INFANTIL
VENT-TP0400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X400) NEONATAL
VENT-TP0450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X450) ADULTO
VENT-TP0450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X450) ADULTO
VENT-TP0450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X450) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 5/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP0450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X450) INFANTIL
VENT-TP0450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X450) ADULTO
VENT-TP0450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X450) INFANTIL
VENT-TP0450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X450) NEONATAL
VENT-TP0500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X500) ADULTO
VENT-TP0500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X500) ADULTO
VENT-TP0500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X500) INFANTIL
VENT-TP0500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X500) ADULTO
VENT-TP0500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X500) INFANTIL
VENT-TP0500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X500) NEONATAL
VENT-TP0550AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X550) ADULTO
VENT-TP0550ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X550) ADULTO
VENT-TP0550IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0550INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0550INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X550) INFANTIL
VENT-TP0550INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0550NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0550AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X550) ADULTO
VENT-TP0550III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X550) INFANTIL
VENT-TP0550NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X550) NEONATAL
VENT-TP0600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X600) ADULTO
VENT-TP0600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X600) ADULTO
VENT-TP0600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X600) INFANTIL
VENT-TP0600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X600) ADULTO
VENT-TP0600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X600) INFANTIL
VENT-TP0600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X600) NEONATAL
VENT-TP0650AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X650) ADULTO
VENT-TP0650ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X650) ADULTO
VENT-TP0650IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0650INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0650INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X650) INFANTIL
VENT-TP0650INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0650NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0650AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X650) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 6/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP0650III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X650) INFANTIL
VENT-TP0650NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X650) NEONATAL
VENT-TP0700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X700) ADULTO
VENT-TP0700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X700) ADULTO
VENT-TP0700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X700) INFANTIL
VENT-TP0700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X700) ADULTO
VENT-TP0700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X700) INFANTIL
VENT-TP0700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X700) NEONATAL
VENT-TP0750AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X750) ADULTO
VENT-TP0750ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X750) ADULTO
VENT-TP0750IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0750INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0750INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X750) INFANTIL
VENT-TP0750INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0750NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0750AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X750) ADULTO
VENT-TP0750III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X750) INFANTIL
VENT-TP0750NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X750) NEONATAL
VENT-TP0800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X800) ADULTO
VENT-TP0800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X800) ADULTO
VENT-TP0800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X800) INFANTIL
VENT-TP0800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X800) ADULTO
VENT-TP0800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X800) INFANTIL
VENT-TP0800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X800) NEONATAL
VENT-TP0850AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X850) ADULTO
VENT-TP0850ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X850) ADULTO
VENT-TP0850IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0850INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0850INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X850) INFANTIL
VENT-TP0850INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0850NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0850AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X850) ADULTO
VENT-TP0850III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X850) INFANTIL
VENT-TP0850NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X850) NEONATAL
VENT-TP0900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X900) ADULTO
VENT-TP0900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X900) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 7/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP0900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X900) INFANTIL
VENT-TP0900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X900) ADULTO
VENT-TP0900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X900) INFANTIL
VENT-TP0900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X900) NEONATAL
VENT-TP0950AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X950) ADULTO
VENT-TP0950ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X950) ADULTO
VENT-TP0950IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0950INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0950INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X950) INFANTIL
VENT-TP0950INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0950NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP0950AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X950) ADULTO
VENT-TP0950III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X950) INFANTIL
VENT-TP0950NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X950) NEONATAL
VENT-TP1000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1000) ADULTO
VENT-TP1000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1000) ADULTO
VENT-TP1000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1000) INFANTIL
VENT-TP1000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1000) ADULTO
VENT-TP1000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1000) INFANTIL
VENT-TP1000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1000) NEONATAL
VENT-TP1050AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1050) ADULTO
VENT-TP1050ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1050) ADULTO
VENT-TP1050IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1050INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1050INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1050) INFANTIL
VENT-TP1050INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1050NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1050AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1050) ADULTO
VENT-TP1050III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1050) INFANTIL
VENT-TP1050NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1050) NEONATAL
VENT-TP1100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1100) ADULTO
VENT-TP1100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1100) ADULTO
VENT-TP1100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1100) INFANTIL
VENT-TP1100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1100) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 8/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP1100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1100) ADULTO
VENT-TP1100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1100) INFANTIL
VENT-TP1100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1100) NEONATAL
VENT-TP1150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1150) ADULTO
VENT-TP1150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1150) ADULTO
VENT-TP1150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1150) INFANTIL
VENT-TP1150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1150) ADULTO
VENT-TP1150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1150) INFANTIL
VENT-TP1150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1150) NEONATAL
VENT-TP1200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1200) ADULTO
VENT-TP1200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1200) ADULTO
VENT-TP1200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1200) INFANTIL
VENT-TP1200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1200) ADULTO
VENT-TP1200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1200) INFANTIL
VENT-TP1200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1200) NEONATAL
VENT-TP1250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1250) ADULTO
VENT-TP1250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1250) ADULTO
VENT-TP1250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1250) INFANTIL
VENT-TP1250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1250) ADULTO
VENT-TP1250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1250) INFANTIL
VENT-TP1250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1250) NEONATAL
VENT-TP1300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1300) ADULTO
VENT-TP1300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1300) ADULTO
VENT-TP1300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1300) INFANTIL
VENT-TP1300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1300) ADULTO
VENT-TP1300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1300) INFANTIL
VENT-TP1300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1300) NEONATAL

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 9/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP1350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1350) ADULTO
VENT-TP1350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1350) ADULTO
VENT-TP1350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1350) INFANTIL
VENT-TP1350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1350) ADULTO
VENT-TP1350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1350) INFANTIL
VENT-TP1350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1350) NEONATAL
VENT-TP1400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1400) ADULTO
VENT-TP1400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1400) ADULTO
VENT-TP1400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1400) INFANTIL
VENT-TP1400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1400) ADULTO
VENT-TP1400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1400) INFANTIL
VENT-TP1400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1400) NEONATAL
VENT-TP1450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1450) ADULTO
VENT-TP1450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1450) ADULTO
VENT-TP1450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1450) INFANTIL
VENT-TP1450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1450) ADULTO
VENT-TP1450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1450) INFANTIL
VENT-TP1450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1450) NEONATAL
VENT-TP1500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1500) ADULTO
VENT-TP1500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1500) ADULTO
VENT-TP1500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1500) INFANTIL
VENT-TP1500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1500) ADULTO
VENT-TP1500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1500) INFANTIL
VENT-TP1500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1500) NEONATAL
VENT-TP1550AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1550) ADULTO
VENT-TP1550ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1550) ADULTO
VENT-TP1550IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1550INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1550) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 10/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP1550INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1550) INFANTIL
VENT-TP1550INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1550NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1550AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1550) ADULTO
VENT-TP1550III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1550) INFANTIL
VENT-TP1550NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1550) NEONATAL
VENT-TP1600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1600) ADULTO
VENT-TP1600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1600) ADULTO
VENT-TP1600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1600) INFANTIL
VENT-TP1600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1600) ADULTO
VENT-TP1600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1600) INFANTIL
VENT-TP1600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1600) NEONATAL
VENT-TP1650AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1650) ADULTO
VENT-TP1650ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1650) ADULTO
VENT-TP1650IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1650INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1650INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1650) INFANTIL
VENT-TP1650INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1650NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1650AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1650) ADULTO
VENT-TP1650III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1650) INFANTIL
VENT-TP1650NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1650) NEONATAL
VENT-TP1700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1700) ADULTO
VENT-TP1700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1700) ADULTO
VENT-TP1700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1700) INFANTIL
VENT-TP1700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1700) ADULTO
VENT-TP1700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1700) INFANTIL
VENT-TP1700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1700) NEONATAL
VENT-TP1750AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1750) ADULTO
VENT-TP1750ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1750) ADULTO
VENT-TP1750IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1750INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1750INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1750) INFANTIL
VENT-TP1750INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1750NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1750AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1750) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 11/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP1750III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1750) INFANTIL
VENT-TP1750NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1750) NEONATAL
VENT-TP1800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1800) ADULTO
VENT-TP1800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1800) ADULTO
VENT-TP1800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1800) INFANTIL
VENT-TP1800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1800) ADULTO
VENT-TP1800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1800) INFANTIL
VENT-TP1800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1800) NEONATAL
VENT-TP1850AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1850) ADULTO
VENT-TP1850ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1850) ADULTO
VENT-TP1850IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1850INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1850INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1850) INFANTIL
VENT-TP1850INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1850NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1850AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1850) ADULTO
VENT-TP1850III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1850) INFANTIL
VENT-TP1850NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1850) NEONATAL
VENT-TP1900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1900) ADULTO
VENT-TP1900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1900) ADULTO
VENT-TP1900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1900) INFANTIL
VENT-TP1900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1900) ADULTO
VENT-TP1900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1900) INFANTIL
VENT-TP1900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1900) NEONATAL
VENT-TP1950AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X1950) ADULTO
VENT-TP1950ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X1950) ADULTO
VENT-TP1950IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1950INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1950INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X1950) INFANTIL
VENT-TP1950INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1950NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TP1950AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X1950) ADULTO
VENT-TP1950III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X1950) INFANTIL
VENT-TP1950NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X1950) NEONATAL
VENT-TP2000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2000) ADULTO
VENT-TP2000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2000) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 12/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP2000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2000) INFANTIL
VENT-TP2000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2000) ADULTO
VENT-TP2000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2000) INFANTIL
VENT-TP2000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2000) NEONATAL
VENT-TP2050AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2050) ADULTO
VENT-TP2050ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2050) ADULTO
VENT-TP2050IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2050INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2050INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2050) INFANTIL
VENT-TP2050INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2050NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2050AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2050) ADULTO
VENT-TP2050III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2050) INFANTIL
VENT-TP2050NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2050) NEONATAL
VENT-TP2100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2100) ADULTO
VENT-TP2100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2100) ADULTO
VENT-TP2100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2100) INFANTIL
VENT-TP2100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2100) ADULTO
VENT-TP2100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2100) INFANTIL
VENT-TP2100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2100) NEONATAL
VENT-TP2150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2150) ADULTO
VENT-TP2150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2150) ADULTO
VENT-TP2150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2150) INFANTIL
VENT-TP2150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2150) ADULTO
VENT-TP2150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2150) INFANTIL
VENT-TP2150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2150) NEONATAL
VENT-TP2200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2200) ADULTO
VENT-TP2200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2200) ADULTO
VENT-TP2200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2200) INFANTIL
VENT-TP2200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2200) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 13/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP2200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2200) ADULTO
VENT-TP2200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2200) INFANTIL
VENT-TP2200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2200) NEONATAL
VENT-TP2250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2250) ADULTO
VENT-TP2250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2250) ADULTO
VENT-TP2250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2250) INFANTIL
VENT-TP2250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2250) ADULTO
VENT-TP2250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2250) INFANTIL
VENT-TP2250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2250) NEONATAL
VENT-TP2300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2300) ADULTO
VENT-TP2300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2300) ADULTO
VENT-TP2300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2300) INFANTIL
VENT-TP2300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2300) ADULTO
VENT-TP2300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2300) INFANTIL
VENT-TP2300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2300) NEONATAL
VENT-TP2350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2350) ADULTO
VENT-TP2350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2350) ADULTO
VENT-TP2350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2350) INFANTIL
VENT-TP2350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2350) ADULTO
VENT-TP2350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2350) INFANTIL
VENT-TP2350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2350) NEONATAL
VENT-TP2400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2400) ADULTO
VENT-TP2400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2400) ADULTO
VENT-TP2400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2400) INFANTIL
VENT-TP2400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2400) ADULTO
VENT-TP2400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2400) INFANTIL
VENT-TP2400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2400) NEONATAL

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 14/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	

VENT-TP2450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2450) ADULTO
VENT-TP2450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2450) ADULTO
VENT-TP2450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2450) INFANTIL
VENT-TP2450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2450) ADULTO
VENT-TP2450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2450) INFANTIL
VENT-TP2450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2450) NEONATAL
VENT-TP2500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2500) ADULTO
VENT-TP2500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2500) ADULTO
VENT-TP2500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2500) INFANTIL
VENT-TP2500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2500) ADULTO
VENT-TP2500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2500) INFANTIL
VENT-TP2500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2500) NEONATAL
VENT-TP2600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2600) ADULTO
VENT-TP2600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2600) ADULTO
VENT-TP2600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2600) INFANTIL
VENT-TP2600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2600) ADULTO
VENT-TP2600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2600) INFANTIL
VENT-TP2600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2600) NEONATAL
VENT-TP2700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2700) ADULTO
VENT-TP2700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2700) ADULTO
VENT-TP2700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2700) INFANTIL
VENT-TP2700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2700) ADULTO
VENT-TP2700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2700) INFANTIL
VENT-TP2700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2700) NEONATAL
VENT-TP2800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2800) ADULTO
VENT-TP2800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2800) ADULTO
VENT-TP2800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2800) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 15/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP2800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2800) INFANTIL
VENT-TP2800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2800) ADULTO
VENT-TP2800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2800) INFANTIL
VENT-TP2800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2800) NEONATAL
VENT-TP2900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X2900) ADULTO
VENT-TP2900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X2900) ADULTO
VENT-TP2900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X2900) INFANTIL
VENT-TP2900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TP2900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X2900) ADULTO
VENT-TP2900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X2900) INFANTIL
VENT-TP2900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X2900) NEONATAL
VENT-TP3000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X3000) ADULTO
VENT-TP3000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X3000) ADULTO
VENT-TP3000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X3000) INFANTIL
VENT-TP3000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X3000) ADULTO
VENT-TP3000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X3000) INFANTIL
VENT-TP3000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X3000) NEONATAL
VENT-TP3500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X3500) ADULTO
VENT-TP3500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X3500) ADULTO
VENT-TP3500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X3500) INFANTIL
VENT-TP3500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP3500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X3500) ADULTO
VENT-TP3500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X3500) INFANTIL
VENT-TP3500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X3500) NEONATAL
VENT-TP4000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X4000) ADULTO
VENT-TP4000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X4000) ADULTO
VENT-TP4000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X4000) INFANTIL
VENT-TP4000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X4000) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 16/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TP4000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X4000) INFANTIL
VENT-TP4000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X4000) NEONATAL
VENT-TP4500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X4500) ADULTO
VENT-TP4500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X4500) ADULTO
VENT-TP4500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X4500) INFANTIL
VENT-TP4500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TP4500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X4500) ADULTO
VENT-TP4500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X4500) INFANTIL
VENT-TP4500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X4500) NEONATAL
VENT-TP5000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X15X22X5000) ADULTO
VENT-TP5000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X13X22X5000) ADULTO
VENT-TP5000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP5000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP5000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X15X5000) INFANTIL
VENT-TP5000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X13X13X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP5000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TP5000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (22X22X22X5000) ADULTO
VENT-TP5000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (15X15X15X5000) INFANTIL
VENT-TP5000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO (13X13X13X5000) NEONATAL

Tabela de modelos (Coloração Cinza)


VENT-TPC0100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X100) ADULTO
VENT-TPC0100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X100) ADULTO
VENT-TPC0100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X100) INFANTIL
VENT-TPC0100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X100) ADULTO
VENT-TPC0100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X100) INFANTIL
VENT-TPC0100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X100) NEONATAL
VENT-TPC0150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X150) ADULTO
VENT-TPC0150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X150) ADULTO
VENT-TPC0150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X150) INFANTIL
VENT-TPC0150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X150) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 17/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC0150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X150) INFANTIL
VENT-TPC0150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X150) NEONATAL
VENT-TPC0200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X200) ADULTO
VENT-TPC0200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X200) ADULTO
VENT-TPC0200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X200) INFANTIL
VENT-TPC0200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X200) ADULTO
VENT-TPC0200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X200) INFANTIL
VENT-TPC0200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X200) NEONATAL
VENT-TPC0250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X250) ADULTO
VENT-TPC0250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X250) ADULTO
VENT-TPC0250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X250) INFANTIL
VENT-TPC0250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X250) ADULTO
VENT-TPC0250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X250) INFANTIL
VENT-TPC0250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X250) NEONATAL
VENT-TPC0300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X300) ADULTO
VENT-TPC0300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X300) ADULTO
VENT-TPC0300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X300) INFANTIL
VENT-TPC0300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X300) ADULTO
VENT-TPC0300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X300) INFANTIL
VENT-TPC0300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X300) NEONATAL
VENT-TPC0350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X350) ADULTO
VENT-TPC0350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X350) ADULTO
VENT-TPC0350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X350) INFANTIL
VENT-TPC0350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X350) ADULTO
VENT-TPC0350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X350) INFANTIL
VENT-TPC0350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X350) NEONATAL
VENT-TPC0400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X400) ADULTO
VENT-TPC0400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X400) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 18/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC0400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X400) INFANTIL
VENT-TPC0400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X400) ADULTO
VENT-TPC0400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X400) INFANTIL
VENT-TPC0400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X400) NEONATAL
VENT-TPC0450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X450) ADULTO
VENT-TPC0450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X450) ADULTO
VENT-TPC0450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X450) INFANTIL
VENT-TPC0450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X450) ADULTO
VENT-TPC0450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X450) INFANTIL
VENT-TPC0450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X450) NEONATAL
VENT-TPC0500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X500) ADULTO
VENT-TPC0500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X500) ADULTO
VENT-TPC0500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X500) INFANTIL
VENT-TPC0500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X500) ADULTO
VENT-TPC0500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X500) INFANTIL
VENT-TPC0500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X500) NEONATAL
VENT-TPC0550AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X550) ADULTO
VENT-TPC0550ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X550) ADULTO
VENT-TPC0550IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0550INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0550INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X550) INFANTIL
VENT-TPC0550INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0550NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0550AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X550) ADULTO
VENT-TPC0550III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X550) INFANTIL
VENT-TPC0550NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X550) NEONATAL
VENT-TPC0600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X600) ADULTO
VENT-TPC0600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X600) ADULTO
VENT-TPC0600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X600) INFANTIL
VENT-TPC0600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X600) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 19/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC0600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X600) ADULTO
VENT-TPC0600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X600) INFANTIL
VENT-TPC0600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X600) NEONATAL
VENT-TPC0650AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X650) ADULTO
VENT-TPC0650ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X650) ADULTO
VENT-TPC0650IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0650INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0650INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X650) INFANTIL
VENT-TPC0650INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0650NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0650AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X650) ADULTO
VENT-TPC0650III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X650) INFANTIL
VENT-TPC0650NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X650) NEONATAL
VENT-TPC0700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X700) ADULTO
VENT-TPC0700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X700) ADULTO
VENT-TPC0700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X700) INFANTIL
VENT-TPC0700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X700) ADULTO
VENT-TPC0700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X700) INFANTIL
VENT-TPC0700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X700) NEONATAL
VENT-TPC0750AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X750) ADULTO
VENT-TPC0750ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X750) ADULTO
VENT-TPC0750IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0750INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0750INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X750) INFANTIL
VENT-TPC0750INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0750NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0750AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X750) ADULTO
VENT-TPC0750III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X750) INFANTIL
VENT-TPC0750NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X750) NEONATAL
VENT-TPC0800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X800) ADULTO
VENT-TPC0800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X800) ADULTO
VENT-TPC0800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X800) INFANTIL
VENT-TPC0800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X800) ADULTO
VENT-TPC0800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X800) INFANTIL
VENT-TPC0800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X800) NEONATAL

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 20/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC0850AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X850) ADULTO
VENT-TPC0850ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X850) ADULTO
VENT-TPC0850IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0850INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0850INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X850) INFANTIL
VENT-TPC0850INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0850NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0850AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X850) ADULTO
VENT-TPC0850III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X850) INFANTIL
VENT-TPC0850NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X850) NEONATAL
VENT-TPC0900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X900) ADULTO
VENT-TPC0900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X900) ADULTO
VENT-TPC0900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X900) INFANTIL
VENT-TPC0900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X900) ADULTO
VENT-TPC0900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X900) INFANTIL
VENT-TPC0900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X900) NEONATAL
VENT-TPC0950AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X950) ADULTO
VENT-TPC0950ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X950) ADULTO
VENT-TPC0950IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0950INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0950INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X950) INFANTIL
VENT-TPC0950INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0950NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC0950AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X950) ADULTO
VENT-TPC0950III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X950) INFANTIL
VENT-TPC0950NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X950) NEONATAL
VENT-TPC1000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1000) ADULTO
VENT-TPC1000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1000) ADULTO
VENT-TPC1000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1000) INFANTIL
VENT-TPC1000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1000) ADULTO
VENT-TPC1000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1000) INFANTIL
VENT-TPC1000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1000) NEONATAL
VENT-TPC1050AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1050) ADULTO
VENT-TPC1050ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1050) ADULTO
VENT-TPC1050IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1050INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1050) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 21/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC1050INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1050) INFANTIL
VENT-TPC1050INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1050NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1050AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1050) ADULTO
VENT-TPC1050III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1050) INFANTIL
VENT-TPC1050NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1050) NEONATAL
VENT-TPC1100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1100) ADULTO
VENT-TPC1100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1100) ADULTO
VENT-TPC1100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1100) INFANTIL
VENT-TPC1100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1100) ADULTO
VENT-TPC1100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1100) INFANTIL
VENT-TPC1100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1100) NEONATAL
VENT-TPC1150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1150) ADULTO
VENT-TPC1150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1150) ADULTO
VENT-TPC1150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1150) INFANTIL
VENT-TPC1150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1150) ADULTO
VENT-TPC1150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1150) INFANTIL
VENT-TPC1150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1150) NEONATAL
VENT-TPC1200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1200) ADULTO
VENT-TPC1200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1200) ADULTO
VENT-TPC1200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1200) INFANTIL
VENT-TPC1200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1200) ADULTO
VENT-TPC1200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1200) INFANTIL
VENT-TPC1200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1200) NEONATAL
VENT-TPC1250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1250) ADULTO
VENT-TPC1250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1250) ADULTO
VENT-TPC1250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1250) INFANTIL
VENT-TPC1250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1250) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 22/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC1250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1250) INFANTIL
VENT-TPC1250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1250) NEONATAL
VENT-TPC1300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1300) ADULTO
VENT-TPC1300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1300) ADULTO
VENT-TPC1300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1300) INFANTIL
VENT-TPC1300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1300) ADULTO
VENT-TPC1300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1300) INFANTIL
VENT-TPC1300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1300) NEONATAL
VENT-TPC1350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1350) ADULTO
VENT-TPC1350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1350) ADULTO
VENT-TPC1350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1350) INFANTIL
VENT-TPC1350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1350) ADULTO
VENT-TPC1350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1350) INFANTIL
VENT-TPC1350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1350) NEONATAL
VENT-TPC1400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1400) ADULTO
VENT-TPC1400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1400) ADULTO
VENT-TPC1400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1400) INFANTIL
VENT-TPC1400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1400) ADULTO
VENT-TPC1400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1400) INFANTIL
VENT-TPC1400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1400) NEONATAL
VENT-TPC1450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1450) ADULTO
VENT-TPC1450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1450) ADULTO
VENT-TPC1450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1450) INFANTIL
VENT-TPC1450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1450) ADULTO
VENT-TPC1450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1450) INFANTIL
VENT-TPC1450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1450) NEONATAL
VENT-TPC1500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1500) ADULTO
VENT-TPC1500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1500) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 23/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC1500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1500) INFANTIL
VENT-TPC1500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1500) ADULTO
VENT-TPC1500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1500) INFANTIL
VENT-TPC1500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1500) NEONATAL
VENT-TPC1550AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1550) ADULTO
VENT-TPC1550ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1550) ADULTO
VENT-TPC1550IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1550INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1550INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1550) INFANTIL
VENT-TPC1550INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1550NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1550) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1550AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1550) ADULTO
VENT-TPC1550III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1550) INFANTIL
VENT-TPC1550NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1550) NEONATAL
VENT-TPC1600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1600) ADULTO
VENT-TPC1600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1600) ADULTO
VENT-TPC1600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1600) INFANTIL
VENT-TPC1600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1600) ADULTO
VENT-TPC1600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1600) INFANTIL
VENT-TPC1600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1600) NEONATAL
VENT-TPC1650AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1650) ADULTO
VENT-TPC1650ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1650) ADULTO
VENT-TPC1650IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1650INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1650INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1650) INFANTIL
VENT-TPC1650INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1650NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1650) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1650AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1650) ADULTO
VENT-TPC1650III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1650) INFANTIL
VENT-TPC1650NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1650) NEONATAL
VENT-TPC1700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1700) ADULTO
VENT-TPC1700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1700) ADULTO
VENT-TPC1700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1700) INFANTIL
VENT-TPC1700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1700) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 24/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC1700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1700) ADULTO
VENT-TPC1700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1700) INFANTIL
VENT-TPC1700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1700) NEONATAL
VENT-TPC1750AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1750) ADULTO
VENT-TPC1750ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1750) ADULTO
VENT-TPC1750IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1750INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1750INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1750) INFANTIL
VENT-TPC1750INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1750NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1750) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1750AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1750) ADULTO
VENT-TPC1750III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1750) INFANTIL
VENT-TPC1750NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1750) NEONATAL
VENT-TPC1800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1800) ADULTO
VENT-TPC1800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1800) ADULTO
VENT-TPC1800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1800) INFANTIL
VENT-TPC1800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1800) ADULTO
VENT-TPC1800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1800) INFANTIL
VENT-TPC1800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1800) NEONATAL
VENT-TPC1850AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1850) ADULTO
VENT-TPC1850ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1850) ADULTO
VENT-TPC1850IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1850INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1850INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1850) INFANTIL
VENT-TPC1850INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1850NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1850) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1850AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1850) ADULTO
VENT-TPC1850III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1850) INFANTIL
VENT-TPC1850NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1850) NEONATAL
VENT-TPC1900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1900) ADULTO
VENT-TPC1900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1900) ADULTO
VENT-TPC1900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1900) INFANTIL
VENT-TPC1900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1900) ADULTO
VENT-TPC1900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1900) INFANTIL
VENT-TPC1900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1900) NEONATAL

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 25/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC1950AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X1950) ADULTO
VENT-TPC1950ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X1950) ADULTO
VENT-TPC1950IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1950INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1950INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X1950) INFANTIL
VENT-TPC1950INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1950NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X1950) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC1950AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X1950) ADULTO
VENT-TPC1950III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X1950) INFANTIL
VENT-TPC1950NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X1950) NEONATAL
VENT-TPC2000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2000) ADULTO
VENT-TPC2000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2000) ADULTO
VENT-TPC2000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2000) INFANTIL
VENT-TPC2000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2000) ADULTO
VENT-TPC2000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2000) INFANTIL
VENT-TPC2000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2000) NEONATAL
VENT-TPC2050AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2050) ADULTO
VENT-TPC2050ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2050) ADULTO
VENT-TPC2050IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2050INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2050INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2050) INFANTIL
VENT-TPC2050INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2050NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2050) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2050AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2050) ADULTO
VENT-TPC2050III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2050) INFANTIL
VENT-TPC2050NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2050) NEONATAL
VENT-TPC2100AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2100) ADULTO
VENT-TPC2100ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2100) ADULTO
VENT-TPC2100IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2100INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2100INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2100) INFANTIL
VENT-TPC2100INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2100NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2100) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2100AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2100) ADULTO
VENT-TPC2100III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2100) INFANTIL
VENT-TPC2100NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2100) NEONATAL
VENT-TPC2150AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2150) ADULTO
VENT-TPC2150ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2150) ADULTO
VENT-TPC2150IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2150INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2150) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 26/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	


VENT-TPC2150INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2150) INFANTIL
VENT-TPC2150INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2150NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2150) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2150AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2150) ADULTO
VENT-TPC2150III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2150) INFANTIL
VENT-TPC2150NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2150) NEONATAL
VENT-TPC2200AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2200) ADULTO
VENT-TPC2200ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2200) ADULTO
VENT-TPC2200IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2200INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2200INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2200) INFANTIL
VENT-TPC2200INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2200NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2200) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2200AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2200) ADULTO
VENT-TPC2200III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2200) INFANTIL
VENT-TPC2200NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2200) NEONATAL
VENT-TPC2250AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2250) ADULTO
VENT-TPC2250ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2250) ADULTO
VENT-TPC2250IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2250INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2250INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2250) INFANTIL
VENT-TPC2250INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2250NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2250) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2250AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2250) ADULTO
VENT-TPC2250III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2250) INFANTIL
VENT-TPC2250NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2250) NEONATAL
VENT-TPC2300AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2300) ADULTO
VENT-TPC2300ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2300) ADULTO
VENT-TPC2300IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2300INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2300INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2300) INFANTIL
VENT-TPC2300INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2300NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2300) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2300AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2300) ADULTO
VENT-TPC2300III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2300) INFANTIL
VENT-TPC2300NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2300) NEONATAL
VENT-TPC2350AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2350) ADULTO
VENT-TPC2350ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2350) ADULTO
VENT-TPC2350IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2350INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2350INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2350) INFANTIL
VENT-TPC2350INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2350NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2350) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2350AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2350) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 27/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	

VENT-TPC2350III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2350) INFANTIL
VENT-TPC2350NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2350) NEONATAL
VENT-TPC2400AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2400) ADULTO
VENT-TPC2400ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2400) ADULTO
VENT-TPC2400IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2400INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2400INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2400) INFANTIL
VENT-TPC2400INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2400NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2400) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2400AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2400) ADULTO
VENT-TPC2400III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2400) INFANTIL
VENT-TPC2400NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2400) NEONATAL
VENT-TPC2450AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2450) ADULTO
VENT-TPC2450ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2450) ADULTO
VENT-TPC2450IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2450INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2450INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2450) INFANTIL
VENT-TPC2450INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2450NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2450) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2450AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2450) ADULTO
VENT-TPC2450III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2450) INFANTIL
VENT-TPC2450NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2450) NEONATAL
VENT-TPC2500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2500) ADULTO
VENT-TPC2500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2500) ADULTO
VENT-TPC2500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2500) INFANTIL
VENT-TPC2500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2500) ADULTO
VENT-TPC2500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2500) INFANTIL
VENT-TPC2500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2500) NEONATAL
VENT-TPC2600AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2600) ADULTO
VENT-TPC2600ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2600) ADULTO
VENT-TPC2600IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2600INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2600INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2600) INFANTIL
VENT-TPC2600INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2600NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2600) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2600AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2600) ADULTO
VENT-TPC2600III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2600) INFANTIL
VENT-TPC2600NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2600) NEONATAL
VENT-TPC2700AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2700) ADULTO
VENT-TPC2700ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2700) ADULTO

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 28/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	

VENT-TPC2700IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2700INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2700INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2700) INFANTIL
VENT-TPC2700INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2700NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2700) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2700AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2700) ADULTO
VENT-TPC2700III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2700) INFANTIL
VENT-TPC2700NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2700) NEONATAL
VENT-TPC2800AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2800) ADULTO
VENT-TPC2800ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2800) ADULTO
VENT-TPC2800IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2800INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2800INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2800) INFANTIL
VENT-TPC2800INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2800NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2800) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2800AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2800) ADULTO
VENT-TPC2800III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2800) INFANTIL
VENT-TPC2800NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2800) NEONATAL
VENT-TPC2900AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X2900) ADULTO
VENT-TPC2900ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X2900) ADULTO
VENT-TPC2900IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2900INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2900INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X2900) INFANTIL
VENT-TPC2900INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2900NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X2900) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC2900AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X2900) ADULTO
VENT-TPC2900III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X2900) INFANTIL
VENT-TPC2900NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X2900) NEONATAL
VENT-TPC3000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X3000) ADULTO
VENT-TPC3000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X3000) ADULTO
VENT-TPC3000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X3000) INFANTIL
VENT-TPC3000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X3000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X3000) ADULTO
VENT-TPC3000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X3000) INFANTIL
VENT-TPC3000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X3000) NEONATAL
VENT-TPC3500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X3500) ADULTO
VENT-TPC3500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X3500) ADULTO
VENT-TPC3500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X3500) INFANTIL
VENT-TPC3500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X3500) ASSIMÉTRICA

	Instrução de uso do produto	Código: MI01	Data: 25/11/2025
		Página: 29/29	
	Traqueias em PVC ATÓXICO CINZA	Versão: 01	

VENT-TPC3500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X3500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC3500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X3500) ADULTO
VENT-TPC3500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X3500) INFANTIL
VENT-TPC3500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X3500) NEONATAL
VENT-TPC4000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X4000) ADULTO
VENT-TPC4000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X4000) ADULTO
VENT-TPC4000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X4000) INFANTIL
VENT-TPC4000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X4000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X4000) ADULTO
VENT-TPC4000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X4000) INFANTIL
VENT-TPC4000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X4000) NEONATAL
VENT-TPC4500AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X4500) ADULTO
VENT-TPC4500ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X4500) ADULTO
VENT-TPC4500IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4500INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4500INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X4500) INFANTIL
VENT-TPC4500INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4500NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X4500) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC4500AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X4500) ADULTO
VENT-TPC4500III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X4500) INFANTIL
VENT-TPC4500NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X4500) NEONATAL
VENT-TPC5000AIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X15X22X5000) ADULTO
VENT-TPC5000ANA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X13X22X5000) ADULTO
VENT-TPC5000IIA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC5000INA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC5000INI	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X15X5000) INFANTIL
VENT-TPC5000INN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X13X13X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC5000NNA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X22X5000) ASSIMÉTRICA
VENT-TPC5000AAA	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (22X22X22X5000) ADULTO
VENT-TPC5000III	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (15X15X15X5000) INFANTIL
VENT-TPC5000NNN	TRAQUEIA DE PVC ATÓXICO CINZA (13X13X13X5000) NEONATAL