

Máscaras Cirúrgicas Descartáveis

I. Modelos

Máscaras Cirúrgicas Descartáveis

II. Apresentação Comercial

Caixas de papel cartão contendo 1 unidade, 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, 60 unidades, 70 unidades, 80 unidades, 90 unidades, 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades, 500 unidades, 1.000 unidades, 5.000 unidades e 10.000 unidades. Produto de uso único.

III. Finalidade

A Máscaras Cirúrgicas Descartáveis servir de barreira física à propagação de bactérias, da cavidade oral do usuário para o ar ambiente e campo cirúrgico, reduzindo a carga bacteriana no ar ambiente. São utilizadas para a proteção de profissionais Médicos, Veterinários, Dentistas e Enfermeiras durante a realização de procedimentos em geral. A Máscara Cirúrgica também é utilizada na proteção do paciente, por exemplo durante a realização de procedimentos assépticos.

IV. Princípio de Funcionamento

Quando atada ao rosto, filtra o ar que entra e o que sai das narinas e boca de suas respectivas partículas e microorganismos.

V. Modo de Uso

1. Retirar a máscara da embalagem original.
2. Passar os elásticos atrás da parte posterior das orelhas, fixando a máscara ao rosto do usuário, de modo que o nariz e a boca fiquem totalmente protegidos.
3. As máscaras devem ser trocadas a cada 8 horas.
4. Por ser um produto de uso único, a máscara deverá ser descartada, após o uso.

VI. Prazo de validade

2 anos após a data de fabricação.

VII. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

VIII. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

IX. Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos.

X. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XI. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado e familiarizado com os procedimentos utilizados na área médico hospitalar. Rotação de estoque: o princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todos os artigos, estéreis e não estéreis, em todas as áreas de estocagem.

XII. Advertências

A máscara deve ser ajustada ao rosto do usuário para evitar que durante o uso não incomode.

Não utilizar a máscara caso ela não esteja íntegra.

Caso os elásticos de fixação arrebentem, a máscara deverá ser trocada.

Em caso de alergia, descontinuar o uso da máscara.

XIII. Precauções

Este produto deverá ser usado com prudência;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem e ler atentamente as instruções de uso;

Em caso de dúvidas quanto a integridade da embalagem externa, não utilizar o produto;

Em hipótese alguma o artigo poderá ser reaproveitado, sendo de uso único;

Uma vez utilizando, o material deverá ser descartado adequadamente de acordo com normas estabelecidas;

Produto não estéril.

Não utilizar, caso a máscara esteja rasgada ou molhada.

XIV. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda. obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

Anhui Kangda Medical Products Co., Limited

No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - 02.248.312/0001-44

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa - MG

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves – CRBM-3: 14736

Reg. MS: 80258020105

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Teleendas: 0800 703 1772