

# Lubrīnat®

## hialuronato de sódio

GEL HIDRATANTE INTRAVAGINAL

### APRESENTAÇÃO

Cerquinho com bismaga de 30g de gel + 10 aplicadores descartáveis.  
Cerquinho com bismaga de 10g de gel + 3 aplicadores descartáveis de amostra grátis.  
USO ADULTO.

### INFORMAÇÕES

Lubrīnat® é um hidratante intravaginal na forma de gel que restaura naturalmente a umidade vaginal, com duração de até 3 dias após cada aplicação. Lubrīnat elimina as células epiteliais secas e, quando usado regularmente, restabelece a umidade vaginal natural.

#### O que é o hidratante intravaginal com hialuronato de sódio?

É uma formulação não hormonal em gel para o tratamento da secura vaginal, possui hialuronato de sódio, uma molécula natural, presente em muitos tecidos humanos e responsáveis pela manutenção do nível correto de hidratação nos tecidos, sendo, portanto, um reservatório natural do corpo para água, e é responsável por manter os níveis corretos de umidade e hidratação em ambientes sensíveis.  
O hidratante intravaginal possui lactato de sódio, é responsável pela manutenção do pH vaginal entre 3,5 e 4,5 isidótopo, evitando a proliferação de fungos e bactérias locais e eliminando coceiras, inflamações, infecções bacterianas e aror decorrente da falta de hidratação vaginal.

#### Quem pode utilizar?

Hidratante intravaginal com hialuronato de sódio foi desenvolvido especialmente para as mulheres que sofrem de secura vaginal de vários origens, cujo epitélio vaginal não produz suficiente hidratação e, portanto, está propensa a coceira, inflamação, infecções bacterianas e relações sexuais dolorosas, assim como, após o parto, durante a menopausa, tratamentos com quimioterapias e períodos de estresses.

#### Qual é a composição?

Hialuronato de sódio, propilenodiol, hialêlase, benzoato de sódio, metilparabeno, lactato de sódio, óleo de ricino etoxilado, ácido láctico, água purificada.

#### Como utilizar?

É recomendado aplicações de 3 em 3 dias, reduzindo o espaçamento entre as aplicações caso seja necessário, sem causar danos à flora natural da vagina, ou, conforme orientação médica.

VERSÃO: 03

DATA: 13/01/2021

### INSTRUÇÕES DE USO – COMO APLICAR



- 1- Separe um aplicador e abra a tampa da bismaga.
- 2- Encaixe o aplicador no bico da bismaga rosqueando-o lentamente.
- 3- Após o encaixe do aplicador, em posição horizontal, aperte suavemente a base da bismaga com os dedos, forçando a entrada do gel no aplicador, preenchendo-o até o limite recomendado.
- 4- Retire o aplicador e feche a bismaga.
- 5- Delicada de costas, com as pernas dobradas, introduza delicadamente o aplicador na vagina, o mais profundamente possível e aplique o conteúdo do aplicador no interior da vagina. O aplicador ginecológico é descartável, após o uso inutilizá-lo.

#### Como sei que estou utilizando a quantidade correta?

O aplicador descartável que acompanha o hidratante intravaginal possui um mecanismo que quando preenchido conforme instruções de uso fornece 3g de gel, quantidade indicada por aplicação.

#### Pode ser utilizado como lubrificante íntimo antes da relação sexual?

Sim, porém, se aplicado regularmente, não haverá necessidade da aplicação anterior ao ato sexual, já que o hidratante intravaginal é um tratamento para o ressecamento vaginal.

#### Pode ser utilizado outros cremes vaginais?

A utilização com outros cremes deve ser orientada pelo médico.

#### Por quanto tempo deve-se utilizar?

Pode ser utilizado de forma contínua ou a critério médico.

#### Quais as precauções para utilização?

- Utilizar o hidratante intravaginal sob supervisão médica.
- Indicado somente para uso intravaginal.
- O produto pode ser utilizado durante a menstruação.
- Caso ocorra irritação local, suspenda o uso e procure o médico.
- Não utilizar o produto após a data de validade.
- Os aplicadores são descartáveis, após o uso inutilizá-los.
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada.
- Não usar fora do alcance dos cremes.
- Conservar e armazenar o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz, calor e umidade.

#### Quais os efeitos indesejados do hidratante intravaginal?

Até o momento não há relatos de efeitos indesejados com a utilização do hidratante intravaginal. Este produto é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da formulação.

#### Como deve ser armazenado?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C) e protegido da luz, calor e umidade.

Nº DO LOJE: DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: NIDE CARUCHO, Cadastro ANVISA Nº: 8.142044.0000  
Registrado por: Cosmid Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. C.N.P.J.: 61.082.426/00167-4, Rua VPR-3, S/Nº, Quadra 2A, Módulos 2021, Terceiro - DAP - Anápolis - GO - CEP 75132-015. Indústria Brasileira. Farm. Resp.: Marlon Silva Gonçalves. CRF- GO- 17.401. Fabricado por: Heliario Farmadulica Ltda. C.N.P.J.: 04.506.487/0001-30. Av. José Abades Casseb, 135, Dist. Ind. Ulses Guimarães - São José do Rio Preto - SP - CEP: 15092-606. Indústria Brasileira. Farm. Resp.: Marysler Ferrari Picolin. CRF-SP: 27.877  
SAC 0800 97 99 900. Lubrīnat®\_V4 - 461701-002

