


## **MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO**

### **MEDI-TRACE ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA KENDALL**

#### **I. INSTRUÇÕES**


1. Preparar

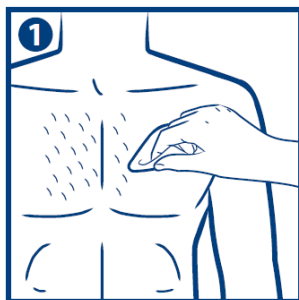


2. Aplicar



3. Registrar

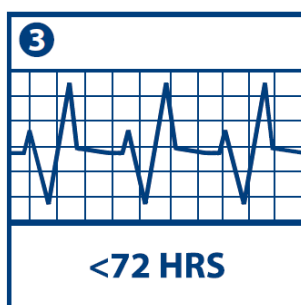

4. Descartar

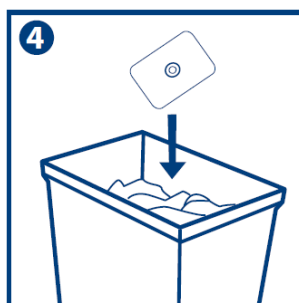

## **2. INDICAÇÕES**

Os elétrodos de eletrocardiograma (ECG) são utilizados para transmitir a atividade elétrica produzida pelo coração através de cabos de derivação ligados a um monitor de ECG.

## **3. PRECAUÇÕES**

Venda apenas sob receita médica. A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por um médico ou mediante receita médica.

Não abra a embalagem até ao momento de utilizar o produto.

Não aplique os eléctrodos sobre os mamilos, pregas de pele, protuberâncias ósseas, cortes, lesões, tecido cicatrizado ou infecções.

Siga o protocolo do hospital quando realizar intervenções eletrocirúrgicas que utilizem a monitorização ECG. Se não o fizer pode provocar queimaduras por radiofrequência no local do eletrodo.

Temperaturas de armazenamento recomendadas para o utilizador: 53,6°F a 89,6°F (12°C a 32°C). O armazenamento acima do intervalo recomendado irá reduzir a respetiva vida útil.






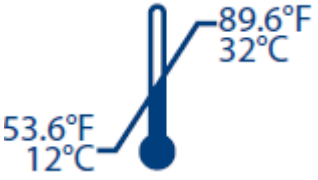




Este produto não pode ser limpo e/ou esterilizado adequadamente pelo utilizador para possibilitar uma reutilização segura e, portanto, destina-se a uma única utilização. As tentativas de limpeza ou esterilização destes dispositivos podem resultar em riscos de bioincompatibilidade, infeção ou falha do produto para o paciente.



Siga o protocolo da instituição para a eliminação adequada de resíduos médicos.

Para um paciente/utilizador/terceiros na União Europeia e em países com um regime regulamentar idêntico (Regulamento [UE] 2017/745 relativo aos dispositivos médicos); se, durante a utilização deste dispositivo ou em resultado da respetiva utilização tiver ocorrido um incidente grave, comunique-o ao fabricante e/ou ao respetivo representante autorizado e à sua autoridade nacional.

Não utilizar se a embalagem que contém a unidade estiver aberta ou danificada. • Não foi fabricado com látex de borracha natural. Não é produzido com DEHP • Dispositivo médico.

## Símbolos dos rótulos e embalagem

	Não estéril
	Uso único
	Não utilizar se embalagem estiver aberta ou danificada
	Não fabricado com látex
	Não contém DEHP
	Limite de temperatura
	Manter afastado da luz solar
	Manter seco
	Fabricante
	Número de catálogo

	Número de lote
	Prazo de validade

**Observação: Este modelo de instrução de uso é aplicado aos seguintes produtos:**

Modelo	Descrição
31050522	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo 200
31078135	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo 230
31478368	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo 233
31478376	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo 235
31118733	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo MINI 100
31112496	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo MINI 130
31439725	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo MINI 133
31439766	MEDI-TRACE Eletrodo para Eletrocardiografia Kendall modelo MINI 135