

280 mm

ANTES DE USAR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO

Atomic70[®]

Desinfetante Estabilizado

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. NÃO NECESSITA ATIVAÇÃO.

NOVA FÓRMULA



CONTEÚDO LÍQUIDO 1L

NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM.

Atomic70[®]

DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO)

LOTE N°



Atomic70[®]

Atomic70 é um desinfetante de alto nível com ação antimicrobiana, cujo princípio ativo é o Hipoclorito estabilizado a 4%.

COMPOSIÇÃO: Carbonato de sódio 3,1%, Carbonato de potássio 0,6%, Cloreto de sódio e Veículo.
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio 4%.

FINALIDADE DE USO: Para desinfecção de artigos semicríticos (endoscópios e outros); artigos não críticos (comadres, papagaios, etc.); superfícies fixas (bancadas, superfícies de equipamentos, etc.).

Também para desinfecção de nível intermediário (material de inaloterapia e assistência ventilatória).

MODO DE USO: Durante a manipulação do produto, usar EPI's adequados tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental ou jaleco. Não agitar a embalagem antes de abrir.

Para desinfecção de alto nível de artigos semicríticos e para desinfecção de nível intermediário: lavar, enxaguar e secar os artigos. Preparar a solução para desinfecção adicionando 5 mL do produto Atomic 70 para cada 1,0 (um) litro de água. Ingerir completamente os artigos na solução deixando em contato por 15 minutos. Enxaguar e secar os artigos após a desinfecção.

Para desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Preparar a solução para desinfecção adicionando 5 mL do produto Atomic 70 para cada 1,0 (um) litro de água. Ingerir completamente os artigos na solução deixando em contato por 15 minutos. Enxaguar e secar os artigos e utilizá-los o mais breve possível.

Para desinfecção de superfícies fixas: preparar a solução para desinfecção adicionando 5 mL do produto Atomic 70 para cada 1,0 (um) litro de água. Aplicar na superfície e deixar a solução em

contato por 15 minutos. Enxaguar, se necessário ou "não precisa enxaguar".

Para as desinfecções de artigos semicríticos, não críticos, de superfícies fixas, etc., a solução pode ser descartada logo após as 24 horas de uso. Após a preparação da solução a concentração deve ser monitorada com as fitas testes da marca Atomic 70[®], distribuída pela Dioxide[®]. Durante o período de 24 horas, a concentração da solução poderá ser verificada a qualquer momento com as fitas testes que medem teor do princípio ativo, indicando "CONFORME 5mL/L", não podendo ficar fora do especificado e, se isso ocorrer, a solução deverá ser descartada. As fitas testes da marca Atomic 70[®] não acompanham o produto.

O Atomic 70 NÃO é corrosivo para os metais: aço inoxidável, cobre e latão. **NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS. NÃO APLICAR SOBRE PESSOAS, ALIMENTOS E ANIMAIS. NÃO COMER, BEBER OU FUMAR DURANTE A APLICAÇÃO.**

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: Conservar o produto em sua embalagem original, em posição vertical, fechado, longe de fontes de calor, umidades e ao abrigo de luz solar direta. Mantenha o produto **LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

MÉTODO DE INATIVAÇÃO E DESCARTE: O produto diluído pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, sem necessidade de tratamento.

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS: **ATENÇÃO! Não ingerir.** Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte imediatamente o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) ou um médico do Serviço de Saúde mais próximo, levando esta embalagem

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) ou um médico do Serviço de Saúde mais próximo, levando esta embalagem

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para um local arejado e se houver sinais de intoxicação chame o socorro médico. Em caso de emergência ligue para CEATOX: 0800 014 8110.

VALIDADE: 12 meses à partir da data de fabricação.

PRODUTO PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR: DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

Av. Vitória Rossi Martini, 641
Distrito Industrial Vitória Martini
Indaiatuba/SP - CEP: 13347-613
CNPJ: 10.945.393/0001-60
I.E.: 353.262.164-110
AFE: 3.06.294-0
Registro ANVISA (M.S n°. 362940002
IND. BRASILEIRA
SAC (19) 3936-1501
www.dioxide.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Tatiane Cristina da Silva
CRQ/SP: 04476720



7 1898994 1106357

Atomic70[®]

140 mm