

237,00 mm

130,00 mm



ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

age em
60
SEGUNDOS*

RTU PEROXY 4D

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS
E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

- Limpa e desinfeta.
- A combinação de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio de 5ª geração, elimina 99,999% de microrganismos* da superfície.

PRONTO USO

Ingredientes Ativos:

Cloreto de Alquil (C12-C16) Dimetil Benzil Amônio +
Cloreto de Didecil Dimetil Amônio:..... **0,08%**
Peróxido de Hidrogênio:..... **1,25%**

CONTEÚDO: 1L

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

RTU PEROXY 4D

É um desinfetante limpador pronto para o uso, à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, desenvolvido especialmente para o uso em hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e odontológicas, podendo ser utilizado em superfícies fixas e artigos não críticos.

RTU PEROXY 4D limpa e desinfeta em uma única operação.

RTU PEROXY 4D é ideal para limpeza e desinfecção de:

SUPERFÍCIES FIXAS:

Piso (sem acabamento acrílico), parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc.

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:

Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

***Microrganismos testados:**

BACTERICIDA:

Age contra as bactérias *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae* e os microrganismos multirresistentes *Klebsiella pneumoniae carbapenemase*, *Acinetobacter baumannii* e *Staphylococcus aureus MRSA*.

Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda • Rod. Adauto Campo Dall'Orto, Km 1,9 - SP 110/330 Sumaré - SP
CEP:13178-440 Fone: (19) 3037 3300 CNPJ: 46.256.772/0002-70 • Indústria Brasileira • www.spartanbrasil.com.br

MODO DE USAR:

RTU PEROXY 4D é um produto pronto para o uso. Deve ser utilizado com tampa dosadora ou gatilho pulverizador de espuma. Goteje ou pulverize RTU PEROXY 4D em um pano de limpeza de algodão, microfibra, não tecido ou descartável e aplique sobre a superfície a ser limpa, utilizando a técnica de aplicação unidirecional.

SUPERFÍCIES FIXAS: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro deixando em contato por 60 segundos. Enxaguar e secar, caso seja necessário.

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los no produto puro deixando em contato por 60 segundos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

As superfícies fixas e artigos não críticos limpos devem permanecer visivelmente úmidos por 60 segundos para desinfecção.

Em superfícies com grau de sujidade elevada ou incrustada, utilizar fibra de limpeza ou escova para ação mecânica.

Informações técnicas adicionais estão descritas no Boletim Técnico do produto, disponível em nosso site www.spartanbrasil.com.br

Produto Registrado MS nº X.XXXX.XXXX



PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. **CUIDADO!** Irritante para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **FECHE A TAMPA APÓS O USO. Água, pode faltar. Não desperdice.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar durante 15 minutos com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações (CEATOX: 0800-722-6001), ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

COMPOSIÇÃO:

Veículo, sequestrante, tensoativos não iônicos, peróxido de hidrogênio, cloreto de alquil (C12-C16) dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetil amônio e alcalinizante.



Número do Lote / Data de Fabricação

0000
00/00/0000

Data de Validade:
18 Meses da Data de Fabricação